

Новинка

ПРОДЛИ МОЛОДОСТЬ!



BELOTERO®

Филлер на основе гиалуроновой кислоты по КПП® технологии

Филлер на основе гиалуроновой кислоты по КПМ® – технологии

БЕЛОТЕРО – монофазный гель нового поколения для контурной пластики.


БЕЛОТЕРО содержит стабильную матрицу, обеспечивающую очевидный и длительный результат.

На современном косметологическом рынке представлено множество филлеров на основе гиалуроновой кислоты (ГК), большинство из которых – двухфазные гели, в которых стабилизированные молекулы ГК сгруппированы в микрочастицы, погруженные в суспензию нестабилизированной ГК.

БЕЛОТЕРО – однофазный гель нового поколения, который целиком состоит из масс поперечно сшитых молекул ГК.



(Тест в чашке Петри предоставлен др. И. Райнмюллером, Висбаден, 2005)

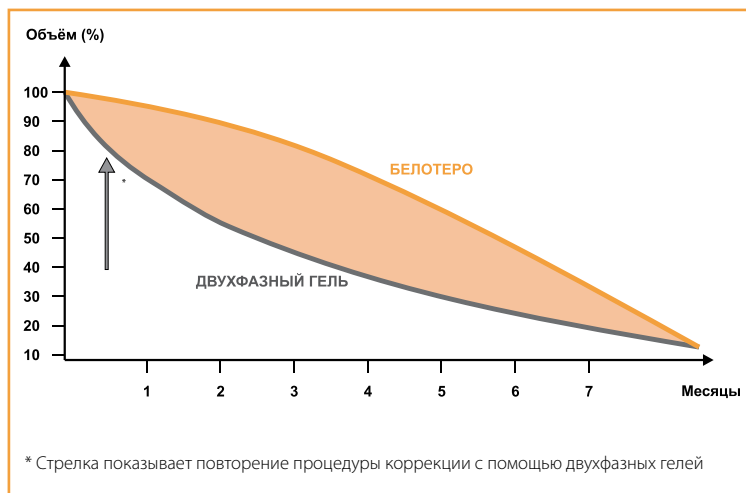

Нативный гель и микрочастицы полимеризованной ГК в двухфазных гелях имеют разную скорость деградации. Несвязанная кислота утилизируется в коже примерно за 15-30 дней. Поэтому после процедуры коррекции с помощью двухфазных гелей наблюдается быстрая потеря объема ткани в первые 2-4 недели. Решением в таком случае может быть либо гиперкоррекция до 120% (что не всегда приветствуется клиентом), либо повторная процедура через 2 недели.

Благодаря своей уникальной монофазной структуре, БЕЛОТЕРО значительно медленнее теряет объем в первые месяцы после инъекции по сравнению с двухфазными гелями. Поэтому после инъекции БЕЛОТЕРО не требуется ни повторная процедура, ни гиперкоррекция.

BELOTERO®


Филлер на основе гиалуроновой кислоты по КПМ® технологии

БЕЛОТЕРО – новаторская КПМ-технология

Неоспоримые преимущества БЕЛОТЕРО обеспечиваются передовой запатентованной технологией когезивной полиуплотненной матрицы – КПМ.


Что такое технология КПМ?

КПМ – это технология динамического сшивания молекул гиалуроновой кислоты, включающая 5 стадий:

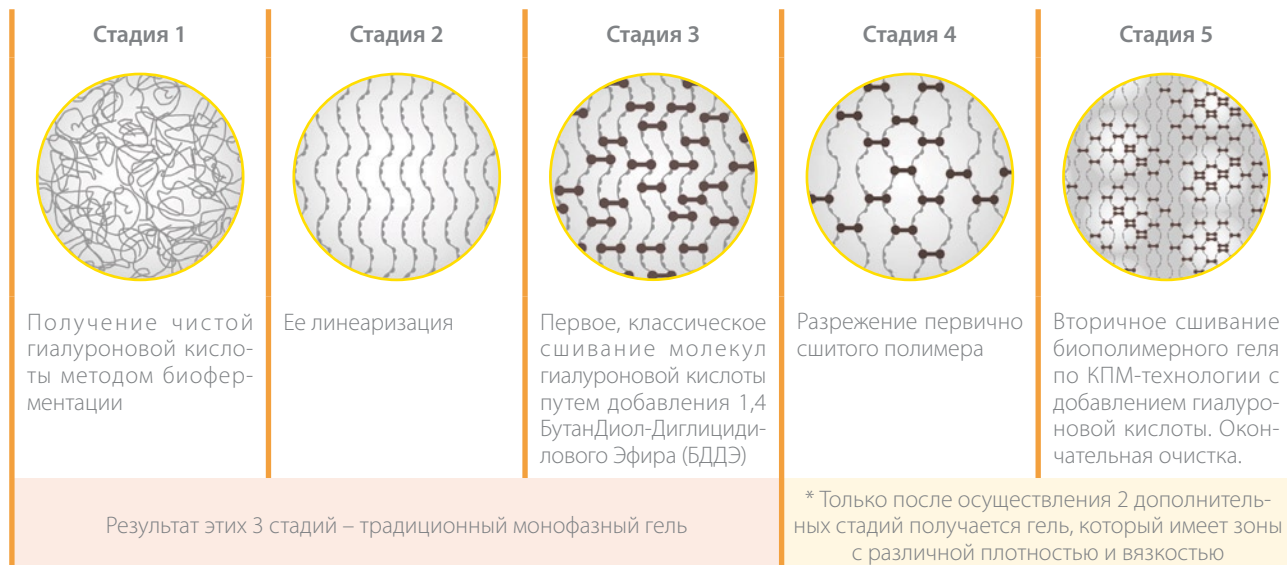

БЕЛОТЕРО – уникальный «лифтинговый» эффект

БЕЛОТЕРО – первый монофазный гель гиалуроновой кислоты с зонами различной плотности. БЕЛОТЕРО проникает во все полости в коже, исправляя дефекты и обеспечивая «лифтинговый» эффект.

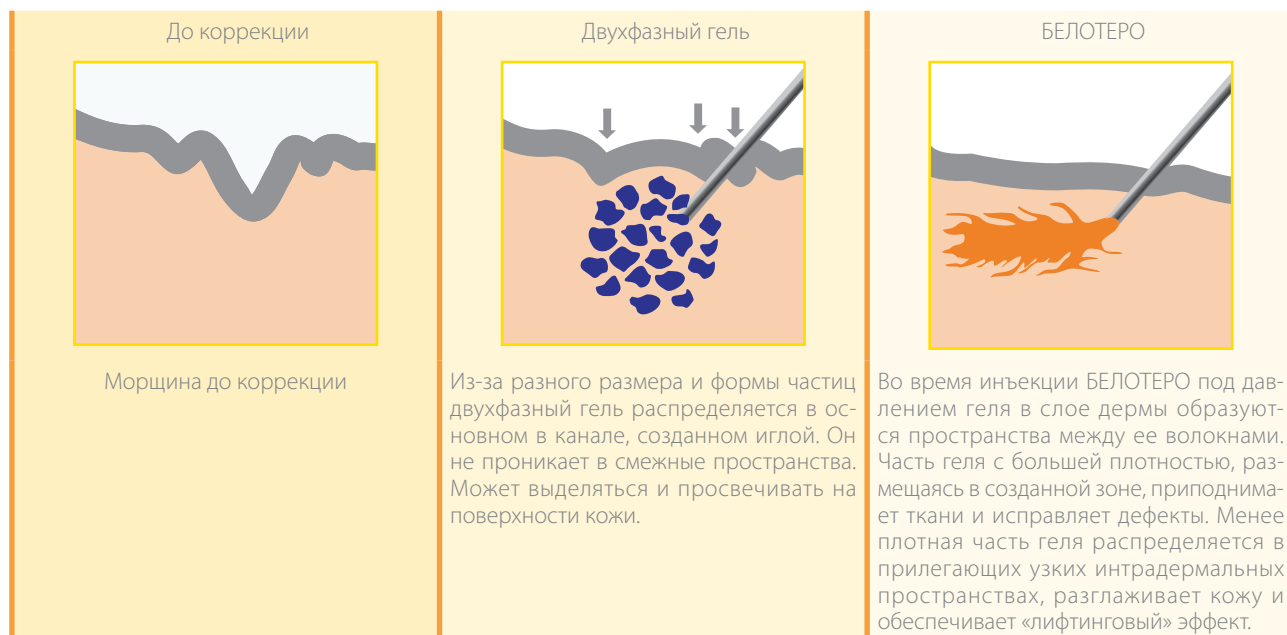

БЕЛОТЕРО – естественный косметический эффект

Благодаря своей структуре с зонами различной плотности, БЕЛОТЕРО создает мягкие переходы между зонами инъекций, с помощью чего достигается естественный косметический эффект.

При использовании двухфазного геля с частицами различного размера и формы существует опасность, что маленькие полости останутся незаполненными, при этом крупные фрагменты размещаются в дерме комковатыми образованиями и оставляют выраженную границу зоны инъекции.



Снимки с помощью микроскопа с 25-кратным увеличением предоставлены д-р. И. Райнмюллером, Висбаден, 2005

БЕЛОТЕРО оптимально распределяется даже под мельчайшими морщинками на участках с тонкой кожей. Уже через несколько дней после инъекции гель не прощупывается и не ощущается. БЕЛОТЕРО создает мягкие переходы между зонами инъекций, и внешний вид кожи остается абсолютно естественным.

БЕЛОТЕРО – комбинация для естественной красоты

БЕЛОТЕРО эффективен:

С помощью БЕЛОТЕРО можно за одну процедуру исправлять дефекты мягких тканей различной степени выраженности (складки, морщины, последствия травмы), добиваясь при этом естественного косметического результата.

БЕЛОТЕРО безопасен:

- ▶ состоит из гиалуроновой кислоты – естественного для кожи человека вещества;
- ▶ производится из гиалуроновой кислоты методом биоферментации;
- ▶ не вызывает аллергии, не требует предварительного тестирования;
- ▶ высокая степень очистки значительно снижает риск гиперчувствительности и развития гранулем;
- ▶ стабильная pH и осмолярность снижают риск местного отека.

БЕЛОТЕРО комфортен:

- ▶ легкое и безболезненное введение препарата;
- ▶ идеальная биоинтеграция без формирования защитного инфильтрата;
- ▶ не требует дополнительной коррекции зоны инъекций.

BELOTERO®


Филлер на основе гиалуроновой кислоты по КПП® технологии

БЕЛОТЕРО представлен двумя формами: БЕЙСИК и СОФТ

БЕЛОТЕРО БЕЙСИК

- ▶ Предназначен для коррекции средних и глубоких складок;
- ▶ Устранение углублений на коже, имеющих травматическое происхождение или вызванных старением (шрамы, щеки, лоб, морщины на верхней губе и т.д.);
- ▶ Изменение контуров лица с помощью инъекций в различные его области (например, щеки, лоб, морщины на верхней губе и т.д.);
- ▶ Для коррекции и увеличения объема губ;
- ▶ Изменение формы губ.

Содержание гиалуроновой кислоты	22,5 мг/мл
Объем инъекции	1,0 мл в шприце
Толщина иглы	27 G 1/2
Степень коррекции	Заполнение складки до оптимального косметического; Не требуется гиперкоррекции
Глубина инъекции	Инъекции в средний слой дермы
Техника инъекции	Индивидуальный и локально адаптированный образ действия, например, туннельная техника и точечная техника с возможным послеинъекционным массажем.

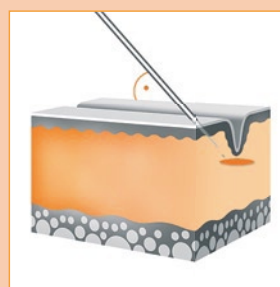


Содержимое наполненного шприца вводится легким равномерным нажимом, таким образом обеспечивается простое обращение со шприцем.

БЕЛОТЕРО СОФТ

- ▶ Для коррекции поверхностных складок;
- ▶ Устранение незначительных углублений на коже, как случайного происхождения, так и вызванных старением (шрамы, тонкие морщины, «гусиные лапки»).

Содержание гиалуроновой кислоты	20 мг/мл
Объем инъекции	1,0 мл в шприце
Толщина иглы	30 G 1/2
Степень коррекции	Заполнение складки до оптимального косметического; Не требуется гиперкоррекции
Глубина инъекции	Инъекции в верхний слой дермы
Техника инъекции	Индивидуальный и локально адаптированный образ действия, например, туннельная техника и точечная техника с возможным послеинъекционным массажем.

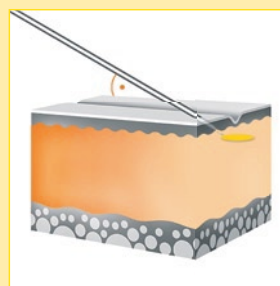

Содержимое наполненного шприца вводится легким равномерным нажимом, таким образом обеспечивается простое обращение со шприцем.

Содержимое наполненного шприца вводится легким равномерным нажимом.

БЕЛОТЕРО расфасован в стеклянные шприцы эргономичного дизайна. Стерилизован влажным паром. Может храниться 2 года при комнатной температуре.

BELOTERO®

Филлер на основе гиалуроновой кислоты по КЛМ® технологии

ИМПЛАНТАТЫ ГРУППЫ БЕЛОТЕРО ДЛЯ ИНТРАДЕРМАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ «Белотеро Бейсик» (Belotero Basic) и «Белотеро Софт» (Belotero Soft)

- ▶ Надежность и эффективность
- ▶ Хорошая переносимость
- ▶ Длительное действие
- ▶ Естественно красивый вид



ООО "Мерц Фарма"
Адрес: 1-ая ул. Ямского поля 9/13, корп. 26
Тел.: (495) 660 76 95
Факс: (499) 257 02 34
<http://www.merz.ru>